

TRASLADO DE ECMO:

Al menos hacen falta tres médicos, uno para el paciente y vía aérea y otros dos para el ECMO, uno para la consola y otro para el compact holder, aunque se pueden también unir (V.dibujo).

- Alarma de flujo mínimo asegurarse que está en “on”.
- Desconectar el motor secundario de la consola.
- Ver que el cable te deja salir.
- Bala de oxígeno conectarle el gas de barrido al mismo flujo.
- Primero se saca la pantalla hacia atrás. (Hay una palanca de la que tirar hacia abajo de la pantalla). La ponemos en la cama o en una silla.
- Seguidamente destornillamos el compact holder.
- Ponemos las dos cosas (consola y compact holder) sobre la cama. No levantar el oxigenado sobre el nivel del paciente. Al apoyar en la cama tener precaución de no tapan la salida de condensación.

Aparte prepararemos un “Plan B”: En una bolsa aparte nos llevaremos:

- Dos clamps (dejarlos fuera).
- Un cable de luz.
- Me llevo también el motor secundario.

Consola Xenios (Modo Transporte)



- Consola + Compact Holder
- Transporte fácil y seguro

